

3M™ Actisorb™ Silver 220 Silber-Aktivkohleverband

Worum handelt es sich?

Actisorb Silver 220 ist eine Aktivkohle-Wundauflage mit Silber, eingeschlossen in einer nichthaftenden Nylonhülle.

Wofür wird es verwendet?


Die Actisorb Silver 220 Wundauflage hilft, unangenehme Wundgerüche zu eliminieren, indem der Geruch in der Wundauflage eingefangen wird. Die Aktivkohle bindet Bakterien sowie Toxine, die den Heilungsprozess beeinträchtigen², das enthaltene Silber tötet die Bakterien in der Wundauflage ab². Wundgeruch wird oft von Wundflüssigkeit begleitet. Die Actisorb Silver 220 Wundauflage kann die Wunddrainage unterstützen, wenn sie mit einem adäquaten Sekundärverband, wie z. B. einer Schaumstoffwundauflage, kombiniert wird.

Wie wird es angewendet?

Vorbereitung der Wunde

Bereiten Sie die Wunde, wie von Ihrem Arzt angewiesen, gemäß der aktuellen Leitlinien zur Wundbehandlung vor. Waschen Sie vor und nach der Anwendung die Hände.

Vorbereitung der Wundauflage

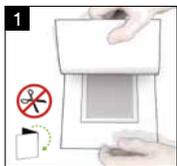

1. Entnehmen Sie die Wundauflage aus der Verpackung.
2. Falls notwendig, können Sie die Wundauflage passend zur Wundgröße falten.
3. Die Wundauflage darf nicht geschnitten werden.

Applikation des Sekundärverbands



1. Decken Sie die Actisorb Silver 220 Wundauflage mit einem Sekundärverband ab und fixieren Sie sie damit, wie von Ihrem Arzt angewiesen. Durch das Halten der Actisorb Silver 220 Wundauflage wird die Applikation des Sekundärverbands erleichtert.

Kontraindikationen: Actisorb Silver 220 sollte nicht auf Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.

Hinweise: Die Actisorb Silver 220 Wundauflage sollte nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Silber verwendet werden. Nur für die äußere Anwendung. Der Verband ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt (nicht wiederverwendbar).

3M Deutschland GmbH | Health Care | Carl-Schurz-Str. 1 | 41453 Neuss
Tel +49 (0)2131 881 9260 | 3Mmedica.de@mmm.com | www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH | Health Care | Kranichberggasse 4 | 1120 Wien
Tel +43 (0)186 68 60 | medizin-at@mmm.com | www.3MAustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH | Health Care | Eggstrasse 91 | 8803 Rüschlikon
Tel +41 (0)44 724 90 90 | innovation.ch@mmm.com | www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions

Vertrieb in Österreich: **CHEMOMEDICA | Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H**
1010 Wien, Wipplingerstraße 19 | Tel.: +43 (0) 1/533 26 66-0 | Fax.: +43 (0) 1/533 26 66-58
info@chemomedica.at | www.chemomedica.at

Wie oft sollte es verwendet werden?

Die Actisorb Silver 220 Wundauflage kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben, abhängig vom Exsudataufkommen. Der Sekundärverband zur Absorption kann nach Bedarf gewechselt werden.


Kann die Wundauflage geschnitten werden?

Nein, die Actisorb Silver 220 Wundauflage kann nicht zugeschnitten werden. Partikel aus der Wundauflage können in die Wunde gelangen und Verfärbungen verursachen.

Auswahl der Wundauflage

Verwenden Sie gemäß der Anweisung Ihres Arztes eine Größe der Actisorb Silver 220 Wundauflage, die etwas größer als die Wunde ist.

Applikation der Wundauflage

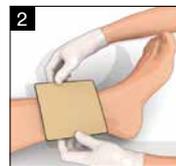

1. Legen Sie Actisorb Silver 220 Wundauflage auf die Wunde (Sie können beide Seiten der Actisorb Silver 220 Wundauflage auf die Wunde legen). Die Wundauflage funktioniert am effektivsten, wenn sie direkten Kontakt mit dem Wundbett hat.

Verbandwechsel und Entfernen der Wundauflage



1. Um die Actisorb Silver 220 Wundauflage zu wechseln, entfernen Sie den Sekundärverband wie von Ihrem Arzt empfohlen.
2. Möglicherweise empfiehlt Ihnen Ihr Arzt, anfangs die Actisorb Silver 220 Wundauflage alle 24 h zu wechseln. Wurde kein Wechselintervall bestimmt, stellen Sie sicher, dass die Wundauflage mindestens alle 7 Tage gewechselt wird.
3. Entfernen Sie die Actisorb Silver 220 Wundauflage vom Wundbett am 7. Tag oder wie von Ihrem Arzt empfohlen. Fragen Sie Ihre medizinische Fachkraft, wie diese ordnungsgemäß entsorgt werden soll.

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument ist für die Selbstversorgung des Patienten nach Anleitung einer medizinischen Fachkraft gedacht und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.

Bitte beachten Sie: Für diese Produkte und Therapien gibt es spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung eine medizinische Fachkraft sowie die Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung ist für medizinische Fachkräfte bestimmt.

Quellenangaben: 1. Nisbet L et al. The beneficial effects of activated charcoal cloth with silver on odour control and bacterial endotoxin binding. Poster presented at: Wounds UK; 2011; Harrogate, UK. 2. Addison D et al. A comparison of the antimicrobial properties of silver dressings for chronic wound care. Poster presented at: EWMA; May 23-25, 2002; Granada, Spain.

© 3M 2022. Alle Rechte vorbehalten. 3M und die anderen gezeigten Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken. Die unberechtigte Nutzung ist untersagt. a33cbd86b9e1/EB12-0189