



SCHNELL UND SANFT



wirksam



schnell



sanft



Meliseptol[®] Foam pure

Desinfektionsschaum für empfindliche Materialien

Meliseptol® Foam pure

AUF EINEN BLICK

- Gebrauchsfertiger Desinfektionsschaum
- Hervorragende Materialverträglichkeit speziell für empfindliche Materialien
- Dank Schaumprühkopf keine Aerosolbildung beim Versprühen
- Schnell wirksam: 1 Minute DGHM¹⁾/VAH²⁾
- Parfümfrei, unauffälliger Geruch
- Auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Leistung: DGHM¹⁾-/VAH²⁾-Liste und in der IHO-Viruzidie-Liste³⁾

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Meliseptol® Foam pure eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen wie z.B. SpaceStation, Perfusor® Space, Infusomat® Space, Blutzuckermessgeräte, OP-Leuchten, Lenovo® Notebooks sowie flexible Endoskope.

Weitere Materialkompatibilitäten sind auf Anfrage erhältlich.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Flächen vollständig mit Meliseptol® Foam pure benetzen und mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten beachten.

Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden.

Artikel	Art.-Nr.	Pharmacode
Schaumprühflasche 750 ml	19796	6586544
Kanister 5 Liter	19288	4114522

WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

Einsatzgebiet	EZ	Testmethode
Flächendesinfektion gem. DGHM ¹⁾ /VAH ²⁾ bakterizid/levurozid	1 Min.* geringe Belastung	DGHM
Begrenzt viruzid (inkl. HBV/HCV/HIV) ⁴⁾	1 Min.	DVV/RKI
Rotaviren	1 Min.	EN14476
TbB (M. terrae)	3 Min.	EN14563
Polyomaviren SV40	5 Min.	EN14476
Noroviren**	5 Min.	EN14476

* Der kürzest mögliche Leistungswert beim VAH beträgt 5 Min.

** Surrogatvirus MNV



SANFT, SCHNELL UND SICHER

Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit | Geruch: unauffällig | pH-Wert: ca. 7.0
Flammpunkt: + 31 °C | Dichte: 0.98 g/ml

Meliseptol® Foam pure

100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 17 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0.23 g, nicht-ionische Tenside. Angaben gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5% nicht-ionische Tenside
Angaben gemäss Gefahrstoffverordnung: Reizend. Gefahr ernster Augenschäden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Augen-/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Warnhinweise:

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

3) www.iho-viruzidie-liste.de

2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene

4) Gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004