



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt anwenden. Der WARTNER® Stift gegen Warzen enthält ein hochwirksames, aber auch äzendes Gel. Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, jeden Schritt der Gebrauchsanweisung zu befolgen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auch nach der ersten Verwendung weiter auf, da Sie diese vielleicht nochmals lesen möchten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

WIE FUNKTIONIERT DER WARTNER® STIFT GEGEN WARZEN?

Der WARTNER® Stift gegen Warzen enthält TCA-Active™ Gel basierend auf dem aktiven Wirkstoff Trichloressigsäure. Dieser medizinische Wirkstoff bewirkt ein Ablösen der infizierten Haut. Das Warzengewebe sowie das ursächliche Virus werden entfernt und neue, gesunde Haut wird sichtbar.

Der WARTNER® Stift gegen Warzen ist ein Medizinprodukt zur schnellen und effektiven Selbstbehandlung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen an Händen und Füßen. Mit dem Präzisionsapplikator lässt sich das Gel einfach auf die Warze auftragen.

WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES WARTNER® STIFTS BEACHTEN?

- Verwenden Sie den Stift nicht,
 - wenn sich die Warze an einem anderen Bereich als auf der Hand oder dem Fuß befindet;
 - auf blutender, gereizter, entzündeter Haut, oder auf Haut, die Anzeichen einer Entzündung wie Juckreiz oder Schwellungen aufweist;
 - auf Stielwarzen, Muttermalen, Leberflecken, Sommersprossen, Wasserwarzen (mollusca contagiosa), Alterswarzen (verrucae seborrhoicae), oder zur Entfernung sonstiger Hautgebilde;
 - wenn Sie empfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe reagieren.
- Falls Sie sich unsicher sind, ob es sich bei Ihnen oder Ihrem Kind um eine Warze handelt oder nicht, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apothekervor der Anwendung.

⚠️ WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Der WARTNER® Stift gegen Warzen enthält eine hochwirksame, aber auch ätzende Säure. Vermeiden Sie den Kontakt mit der gesunden Haut, die die Warze umgibt.
- Falls das Gel mit gesunder Haut in Kontakt kommt, reinigen Sie unmittelbar die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und reichlich Seife um eine Reizung oder eine Verätzung der gesunden Haut zu vermeiden. Vor dem Auftragen des Gels können Sie die umliegende, gesunde Haut mit einer fetthaltigen Creme wie z.B. Vaseline schützen. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, das Gel präzise aufzutragen, z.B. an der Fußsohle, bitten Sie eine andere Person um Hilfe.
- Wenn Sie das Gel zum ersten Mal anwenden, tragen Sie es zuerst auf eine Warze auf, bevor Sie mehrere Warzen behandeln.
- Die behandelte Stelle sollte solange vor direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlen geschützt werden, bis das Hautbild sich wieder normalisiert hat, da dies zu einer Hyper- bzw. Hypopigmentierung führen kann. Dies kann 4 bis 6 Wochen in Anspruch nehmen.
- Berühren Sie die behandelte Haut nicht und zupfen Sie nicht daran herum, da eine Warze ansteckend ist. Ziehen Sie den Schorf nicht ab, da er von selbst abfallen muss.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten. Bei versehentlichem Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten spülen Sie diese mit reichlich Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Aus hygienischen Gründen sollte der Stift nur von einer Person verwendet werden. Das Produkt sollte nach Beendigung der Behandlung entsorgt werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidung, Schmuck, sonstigen Textilien oder Möbeln, da diese beschädigt werden könnten.
- Nach dem Gebrauch können kleine Rückstände des Gels in der Verschlusskappe verbleiben, daher ist Vorsicht beim Schließen und Wiederöffnen der Kappe geboten.
- Konsultieren Sie einen Arzt, wenn:
 - die Warze nach 4 Anwendungsintervallen noch nicht erfolgreich entfernt sein sollte (4 Wochen).
 - Sie Hautreizungen, Rötungen oder Schmerzen erfahren.

FÜR WEN IST DER WARTNER® STIFT GEEIGNET?

Der WARTNER® Stift gegen Warzen kann von Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren angewendet werden. Die Behandlung von Kindern darf nur unter elterlicher Aufsicht erfolgen. Für Kinder wird empfohlen, die Dosierung auf eine Anwendung pro Tag anzupassen. Beachten Sie auch die Hinweise unter ANWENDUNG.

Während der Schwangerschaft oder Stillzeit oder wenn Sie Diabetiker sind, unter Durchblutungsstörungen oder anderen Hauterkrankungen leiden, wird empfohlen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren.

ANWENDUNG

Vorbereitung:

- Entfernen Sie die Kappe. Drehen Sie die Kappe und richten Sie die Pfeile aus. Ziehen Sie dann die Kappe vom Stift ab.

Bei erstmaliger Anwendung:

- Bereiten Sie den Stift vor: Halten Sie den Stift senkrecht mit dem Applikator nach unten. Drehen Sie das obere Stiftdende langsam im Uhrzeigersinn und achten Sie darauf, dass zwischen jedem Klick 3-5 Sekunden liegen. Mit den Umdrehungen wird Druck aufgebaut, um die luftdichte Versiegelung zu brechen und das Gel im Präzisionsapplikator freizusetzen. Es können bis zu 6 volle Umdrehungen nötig sein, bis der erste Tropfen des Gels zu sehen ist. Halten Sie den Stift weiterhin senkrecht mit dem Präzisionsapplikator nach unten, bis das Gel in die Spitze des Applikators fließt.

Um die Wirkung des Produktes auf Ihrer Haut zu testen, tragen Sie das Gel zuerst auf eine Warze auf, bevor Sie mehrere Warzen behandeln. Beginnen Sie mit der Behandlung einer anderen Warze erst, wenn keine Nebenwirkungen (normalerweise innerhalb von 5 Tagen) aufgetreten sind. Wenn Sie mehrere Warzen behandeln wollen, welche nah beieinander liegen (innerhalb von 1 cm), empfehlen wir mit der Therapie weiterer Warzen so lange zu warten, bis das Hautgewebe der ersten Warze vollständig verheilt ist. Dies kann bis zu 6 Wochen in Anspruch nehmen.

Behandlung:

- Tragen Sie einen Tropfen des Gels (ein Klick) vorsichtig auf die Warze auf. Achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche der Warze mit einem dünnen Film des Gels bedeckt ist. Sollte ein Tropfen nicht ausreichend sein, tragen Sie einen weiteren Tropfen auf die Warze auf.
- Lassen Sie das Gel 10-15 Minuten trocknen, bevor Sie Socken, Handschuhe oder Schuhe anziehen.
- Reinigen Sie die Spitze des Applikators vorsichtig mit einem Papiertuch, um überschüssiges Gel zu entfernen. Setzen Sie die Kappe wieder fest auf und drehen Sie die Kappe, sodass die Pfeile nicht mehr zueinander stehen.

Wiederholen Sie die Anwendung 2-mal täglich über 4 Tage hinweg. Bei Kindern wird empfohlen das Gel nur 1-mal täglich anzuwenden.

Nach der Behandlung:

- Nach der Anwendung wird sich neue, gesunde Haut bilden. Zu Ihrem Schutz sollte die behandelte Stelle solange vor direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlen geschützt werden, bis die Haut sich wieder normalisiert hat.
- Die Entfernung der Warze kann bereits nach der ersten Anwendungswoche erfolgreich abgeschlossen sein. Falls die Warze nicht vollständig entfernt wurde, kann die Behandlung nach einer Anwendungspause von 4 Tagen wiederholt werden. Insgesamt darf eine Warze bis maximal 4 Behandlungszyklen durchlaufen.

Hinweis: Falls die Warze von Hornhaut bedeckt ist, ist es ratsam, den Fuß vor der Anwendung für einige Minuten in warmes Wasser zu tauchen und die Hornhaut anschließend mit einer speziellen Feile zu entfernen.

Weitere Informationen unter: www.wartner.com

Während der Behandlung kann sich die Haut dunkel verfärben. Die Haut beginnt sich zu lösen, es bildet sich Schorf. Die Abschälung ist ein natürlicher Teil im Heilungsprozess und kann bis zu 1 bis 2 Wochen nach der Behandlung andauern. Die neue Haut erscheint glatt, leicht rosa und erhält innerhalb der darauffolgenden Wochen ihre natürliche Farbe zurück.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU WARZEN

Gewöhnliche Warzen (verruca vulgaris) und Dornwarzen (verruca plantaris) sind gutartige Hautwucherungen, die von Human Papillomaviren (HPV) verursacht werden. Warzen können an ihrer „blumenkohlartigen“ Oberfläche erkannt werden. Gewöhnliche Warzen treten normalerweise an Händen, Fingern oder Zehen auf. Dornwarzen hingegen wachsen hauptsächlich an Druckstellen an den Fußsohlen oder Fersen und neigen dazu, flacher und härter zu sein und können beim Gehen oder Stehen Schmerzen verursachen. Beide Arten sind hoch ansteckend und betreffen drei von vier Menschen im Laufe ihres Lebens.

KOMBINATION MIT ANDEREN PRÄPARATEN UND/ODER MEDIKAMENTEN

Wenden Sie das Produkt nicht in Kombination mit anderen Präparaten zur Warzenentfernung an. Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

NEBENWIRKUNGEN

Bei der Anwendung auf gesunder Haut kann es zu Stechen, leichtem Brennen oder Schmerzen der behandelten Stelle kommen und damit zu einer Schädigung der Haut führen. Reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich mit reichlich Seife und Wasser, um eine Reizung der gesunden Haut zu vermeiden. Sollten Sie eine Nebenwirkung feststellen, sollte die Behandlung sofort abgebrochen werden. Komplikationen treten nur selten auf. Außer selten können permanente Hautverfärbungen oder Narben entstehen, insbesondere dann, wenn eine Anomalie wie Heilungsstörungen oder Infektionen vorliegen. Sollte dies zutreffen, brechen Sie die Behandlung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

INHALTSSTOFFE

TCA-Active™ Gel (basierend auf Trichloressigsäure), Carbopol, Wasser.

AUFBEWAHRUNG

- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- In der Originalverpackung bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.
- Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Nach Anbruch besitzt das Produkt eine Haltbarkeit von 6 Monaten.

PACKUNGSMENGE

Die Packung enthält einen WARTNER® Stift gegen Warzen (1,5 g). Der Inhalt des WARTNER® Stifts gegen Warzen reicht für die Behandlung von maximal 6 Warzen.

Medical Brands Innovations B.V., Post Heer 1446 199, 1019 HC Amsterdam, The Netherlands
Verteilt DE: Omega Pharma Deutschland GmbH, Benzstraße 25, 70805 Herrenberg
 Perrigo®
LF08020C
15WP.OM.DE.AT.101

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im Mai 2019 überarbeitet.

- Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig lesen
- Ätzende Substanz.
- Herstellerinformationen
- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren
- Bei Raumtemperatur (15-25°C) an einem sicheren, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren
- Das Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
- Chargennummer des Produktes.
- Bitte Warnhinweise beachten
- Nur zur Anwendung bei Warzen an Händen und Fußsohlen
- Haltbarkeit nach Anbruch: Verwendung innerhalb von 6 Monaten nach (erstmaligem) Öffnen.
- CE-Kennzeichnung mit der vierstelligen Kennnummer der am Konformitätsbewertungsverfahren beteiligten benannten Stelle. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinie erfüllt.

CE 2797