



vivamel Wundhonig

DIE PERFEKTE REZEPTUR FÜR OPTIMALE HEILKRAFT

BESCHREIBUNG




VIVAMEL® WUNDHONIG ist ein **steriler Edelkastanienhonig**. Dieser Honig aus den Blüten der Edelkastanie enthält **hohe Konzentrationen von natürlichen antiseptischen und wundheilungsfördernden Substanzen** wie z.B. Peroxide, antimikrobielle Schutzpeptide, Polyphenole, Vitamine, Antioxidantien, Aminosäuren, Spurenelemente und Mineralstoffe. Vivamel® Wundhonig fördert die Wundheilung und wirkt bakteriostatisch; die hohe osmotische Aktivität des Honigs verursacht ein hemmendes Milieu für das Wachstum von Mikroorganismen und fördert die Wundreinigung.

Vivamel® Wundhonig fördert Granulation und Epithelisierung, verringert das Risiko von Wundinfektionen, reduziert Wundgeruch und unterstützt aktiv die Wundreinigung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Durch seine **optimale Zusammensetzung** ist Vivamel® Wundhonig ideal geeignet zur Versorgung von **kleineren und größeren akuten und chronischen Wunden** wie z.B. Schürfwunden, Schnittwunden, Brandwunden, Platzwunden sowie infizierten Wunden, Ulcera und diabetischen Geschwüren **in allen Phasen der Wundheilung**.

VIVAMEL®- PRODUKTE

-  **Vivamel® MEDIZINISCHER HONIG**
reiner medizinischer Edelkastanienhonig ohne Zusätze;
besonders gut zur Anwendung bei tiefen Wunden geeignet.
-  **Vivamel® - ALGINAT**
Calciumalginat – Wundauflage mit Edelkastanienhonig getränkt;
besonders gut für stärker exsudierende Wunden geeignet
-  **Vivamel® CONTACT**
weiches anschmiegsames Polyesternetz mit Edelkastanienhonig
getränkt; besonders gut für Wunden mit geringer Sekretion geeignet.



BESTELLINFORMATION

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Größe	PZN	Packungseinheit
Vivamel® medizinischer Honig	19715	20 g	4023009	5 Stück
	19705	20g	4065812	1 Stück
Vivamel® Alginat	19701	5x 5cm	4023038	10 Stück
	19703	10x10cm	4023050	10 Stück
Vivamel® Contact	19707	5x 5cm	4023015	10 Stück
	19709	10x10cm	4023021	10 Stück

LAGERUNG

Bei Temperaturen zwischen +5° und +35 °C lagern. Der Tubeninhalte ist innerhalb von 4 Monaten nach dem ersten Öffnen aufzubrauchen. Produkte sind nur nach dem ersten Öffnen steril. Tuben bitte aufrecht lagern! Wundauflagen horizontal liegend lagernd, um eine gleichmäßige Verteilung des Honigs in der Wundauflage zu garantieren.

Sterilisation	Haltbarkeit	Medizinprodukt Klasse II b	Hersteller
Elektronenstrahlen	3 Jahre	CE1304	TOSAMA d.o.o. Vir,1230 Domzale, Slowenien

VERTRIEB

CHEMOMEDICA Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H., A - 1010 Wien, Wipplingerstraße 19.
Tel: +43 (1) 533 26 66 0 / Fax: +43 (1) 533 26 66 58 / office@chemomedica.at / www.chemomedica.at.

Rev.stand: 12/2015