

**Brava®**

**Coloplast**

Hautschutzplatte

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.



### Gebrauchsanweisung

23327291 Version 3

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2021-03-12

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Zum Schutz der intakten Haut vor einer Beschädigung durch Stomaausscheidungen und Körpersekrete.

### Warnhinweise

Die Wiederverwendung des Einwegprodukts kann die Gesundheit des Patienten potenziell gefährden.

Die Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und/oder Sterilisation kann die Produktmerkmale beeinträchtigen und somit ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Patienten darstellen.

### Information

Die Hautschutzplatte hat sehr gute Haftungseigenschaften um größtmögliche Sicherheit zu bieten. Vor dem Anbringen der Hautschutzplatte ist es wichtig, an der entsprechenden Stelle alle Haare zu entfernen.


Die Verwendung von Creme führt zu einer geringeren Haftung und verminderten Sicherheit. In bestimmten Fällen kann eine dünne Schicht Creme verwendet werden, wenn die Haftung der Hautschutzplatte zu stark ist.



Das Schutzpapier von der nicht haftenden Seite der Hautschutzplatte abziehen. (An der vorgegebenen Linie knicken und das Schutzpapier abziehen.)




Die gewünschte Lochgröße mit einem Stift markieren.

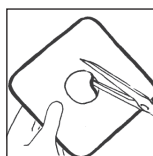

Die gewünschte Lochgröße an der Markierung mit einer Schere ausschneiden.



Die Haut im Stomabereich reinigen und abtrocknen.  
Das Schutzpapier von der haftenden Seite abziehen.

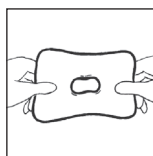

Die Hautschutzplatte auf der Haut anbringen und mit den Fingern festdrücken. Dank der Elastizität der Hautschutzplatte kann das Loch geweitet werden, wenn es zum Beispiel über einem Stoma angebracht wird. Sie zieht sich sofort zusammen und gewährleistet so einen vollständig festen Sitz um das Stoma.

### Entfernen

Die Schutzfolie muss langsam und vorsichtig entfernt werden.

### Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte gemäß den örtlichen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

## Meldung von Vorfällen

Falls es während bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land.

## Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Verfallsdatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Zeigt den Barcode mit der einheitlichen Produktkennzeichnung für Medizinprodukte (Unique Device Identification, UDI) an



(Global Trade Item Number) Globale Artikelidentnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung



MR-sicher