






Gebrauchsanweisung des China-Oel Inhalierstifts

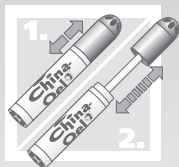


1. Zum Öffnen des China-Oel Inhalierstifts blaues Kapfenoberteil abziehen.
2. Kapfenoberteil mit Aufnahme-Vlies ganz herausziehen.

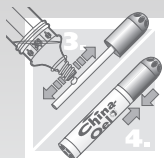

3. 3 Tropfen China-Oel entlang des Vliesröhrchens verteilen.
4. Kapfenoberteil mit Aufnahme-Vlies in das Inhalierstiftunterteil einführen und schließen.

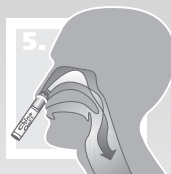

5. Zur Behandlung des Nasenraums: **Blaue Seite** wechselseitig in die Nasenlöcher einführen (höchstens 1 cm) und kräftig durch die **Nase** einatmen.

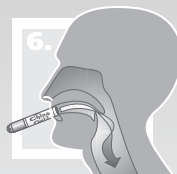

6. Zur Behandlung des Rachenraums: **Weißer Seite** des Inhalierstifts in den **Mund** nehmen (höchstens 1 cm) und tief durchatmen.

Wissenswertes über den Inhalierstift

Der China-Oel Inhalierstift dient nach betäufeln des innenliegenden Faserstiftes mit dem arzneilichen China-Oel zur Inhalation über die Nase oder den Mund.

Pflege und Reinigung des China-Oel Inhalierstifts

Nach Benutzung eines China-Oel Inhalierstifts diesen äußerlich mit einem frischen Tuch abreiben und zweckmäßigerweise in der Original-Packung aufbewahren!

Mit dem China-Oel Inhalierstift unterwegs

Der Vorteil des China-Oel Inhalierstifts liegt darin, dass China-Oel jederzeit und überall, wie im

Büro, Theater, Auto oder auf Reisen, benutzt werden kann. Der Inhalierstift ist einfach und unproblematisch zu handhaben und kann jeweils mit 3 Tropfen China-Oel nachgefüllt werden.

Wichtiger Hinweis

Inhalierstifte mit deutlich erkennbaren Mängeln nicht benutzen! Aus hygienischen Gründen sollte ein Inhalierstift jeweils nur von einer Person benutzt werden. Inhalierstift nach maximal 30 Tagen austauschen. Auf keinen Fall verschlucken! Vor Kindern geschützt aufbewahren! Keine Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren! Beim Aufträufeln des China-Oels auf das Vliesröhrchen darauf achten, dass China-Oel nicht in die Augen gelangt!

Anwendung der Inhalierstifte nur bis zu dem auf dem Inhalierstift und der Faltschachtel genannten Datum.

Den Inhalierstift erhalten Sie als 3er-Pack in der Apotheke unter der PZN 8763022.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit dem China-Oel Inhalierstift aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse an den Hersteller und die zuständige Behörde in ihrem Land.