

WIRKMECHANISMUS/ FUNKTIONSPRINZIP

Pflaster mit FIR (Far Infrared) Technologie, reflektieren die körpereigene Infrarotstrahlung. FIT-Pflaster bestehen zu 100 % aus ungewebtem Polypropylen mit Biomineralien (wie Titan). Spektroskopische wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass eine spezielle Mischung von Mineralien (Metalloxiden) in Pulverform, genannt AT5.05, in der Lage ist, die fernsten Infrarotstrahlen (4-21 Mikrometer) mit der Bezeichnung Far Infrared (FIR) zu reflektieren. Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann diese Technologie auf den menschlichen Körper angewendet werden und die reflektierten Infrarotstrahlen nutzen, die durch die Körperwärme abgegeben werden. Die dadurch erzeugte Schwingung verbessert die Mikrozirkulation in den Blutgefäßen.

ANWENDUNG

Die Pflaster eignen sich:

- Zur Linderung von Beschwerden des Bewegungsapparates, indem die Milchsäure, die durch Überbelastung der Muskelfasern zur Gewebeübersäuerung führt, schneller abgebaut wird.
- Zur funktionellen Wiederherstellung des betroffenen Muskelgewebes, das aufgrund von Überlastung, Muskelkontraktur und Kraftdefiziten beansprucht ist, da sie zur Linderung der Schmerzen beitragen und im entsprechenden Muskelbereich eine muskelentspannende Wirkung erzielen.

WARNHINWEISE

Die Pflaster sind nicht steril und enthalten keine Arzneistoffe.

Pflaster nicht auf Wunden, geschädigter oder irritierter Haut verwenden da sie sonst Infektionen verursachen könnten. Bei Störungen der Blutzirkulation (insbesondere der Mikrozirkulation) oder bestimmten Muskel- oder Kreislauferkrankungen vor der Verwendung Ihren Arzt konsultieren, da das Pflaster unter Umständen unwirksam sein kann und/oder sich die Beschwerden verschlimmern können.

Pflaster nicht verwenden, wenn es Mängel oder Beschädigungen aufweist.

An der Stelle, an der das Pflaster aufgeklebt wird, können Überempfindlichkeitsreaktionen wie Juckreiz, Rötung und in seltenen Fällen Bläschenbildung auftreten. Kommt es nach Auftragen des Pflasters zu diesen Beschwerden, wird empfohlen das Pflaster sofort zu entfernen.

Kindern und schwangeren Frauen wird empfohlen, vor der Verwendung ihren Arzt zu konsultieren, um mögliche unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden.

Ein und dasselbe Pflaster nicht länger als 5 Tage verwenden. Bei Langzeitanwendung (auch aus derselben Packung) das Pflaster regelmäßig durch ein neues ersetzen um Hautrötungen vorzubeugen.

Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums, da es seine Haupteigenschaften verlieren kann.

Die Wirksamkeit des Pflasters ist nicht garantiert, wenn es wiederverwendet wird.

Im Falle einer schweren Nebenwirkung, ist diese unmittelbar dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats des Verwenders zu melden.

LAGERHINWEIS

Zwischen +5°C and +30°C lagern. Die Verpackung schützt die Pflaster während des Transports vor Beschädigungen.

Verpackungsteile richtig im Plastik und Papiermüll entsorgen.

Das Produkt ist kein Wärmepflaster und produziert keine Eigenwärme. Auf Grund der lokal beschleunigten Mikrozirkulation, kann es in seltenen Fällen zu einer leichten Wärmeentwicklung kommen.

SYMBOLE

Gebrauchsanweisung beachten

Kühl aufbewahren

Vor Sonnenlicht schützen

Trocken aufbewahren

Medizinprodukt

Nicht wiederverwenden

Mindesthaltbarkeitsdatum

Charge

Katalognummer

Hersteller

Nicht verwenden wenn Packung beschädigt ist

ANWENDUNG


1. FIT PFLASTER VON DER SCHUTZFOLIE LÖSEN.
2. PFLASTER WIE BESCHRIEBEN IM SCHMERZBEREICH AUF SAUBERER, TROCKENER UND UNBEHAARTER HAUT ANBRINGEN.
3. FÜR EINE BESSERE HAFTUNG AUF DER HAUT, PFLASTER EINIGE MINUTEN ANGEPRESST HALTEN.
4. PFLASTER BIS ZU 5 TAGE AUF DER HAUT BELASSEN.
5. BEHANDLUNG FORTSETZEN BIS SICH DIE SYMPTOME VERBESSERN.

DAS PFLASTER BEHÄLT SEINE FUNKTION AUCH IM NASSEN ZUSTAND (Z.B. BEIM DUSCHEN).




NACKEN

Bei Gelenkproblemen der Wirbelsäule (Nackenschmerzen).

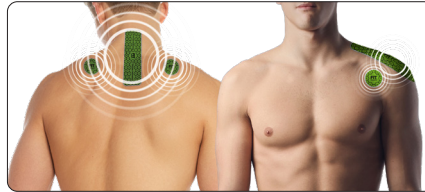

UNIVERSAL


Bei Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Ischiasnervschmerzen, Muskelzerrungen (Schulter, Ellbogen, Knie, Wade usw.).

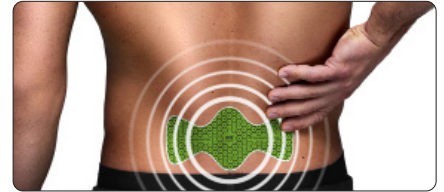

RÜCKEN

Bei Gelenkproblemen der Wirbelsäule (Rückenschmerzen).

Tipps zur Anwendung des Universal-Pflasterkits:

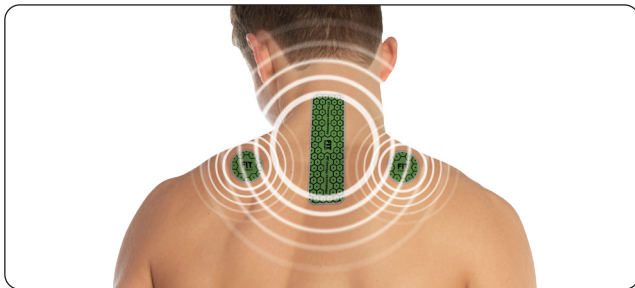


UNIVERSAL PFLASTER FÜR DEN NACKEN

Bei Gelenkproblemen der Wirbelsäule (Nackenschmerzen).




UNIVERSAL PFLASTER FÜR DEN ELLBOGEN

Bei Ellbogenschmerzen und Kontrakturen (Sehnenscheidenentzündung, Prellungen).

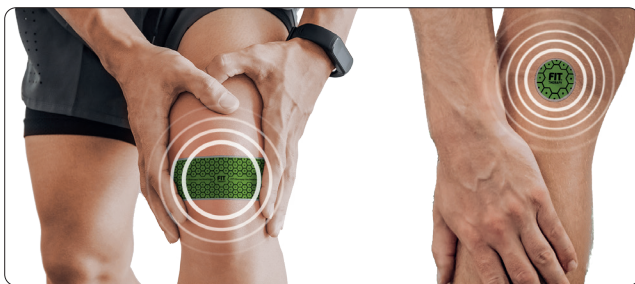


UNIVERSAL PFLASTER FÜR DAS KNIE

Bei Kniegelenksproblemen.

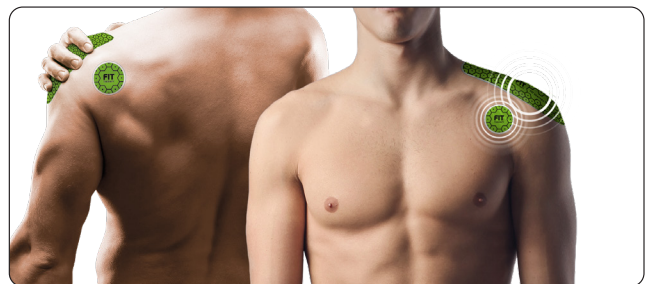

UNIVERSAL PFLASTER FÜR DIE SCHULTER

Bei Schulterschmerzen und Kontrakturen (Arthritis, Arthrose).

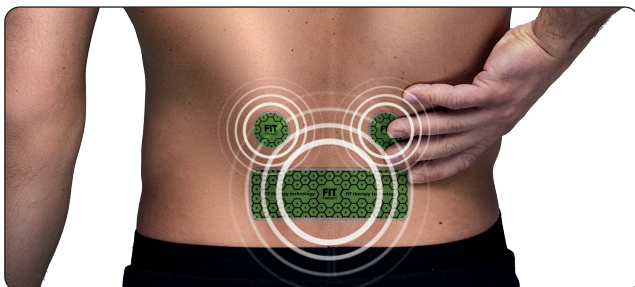

UNIVERSAL PFLASTER FÜR DEN RÜCKEN

Bei Gelenkproblemen der Wirbelsäule (Rückenschmerzen).



UNIVERSAL PFLASTER FÜR DEN KNÖCHEL

Für Knöchelschmerzen und Kontrakturen (Verstauchungen, Sehnenscheidenentzündung).