



Suprasorb® P sensitive non-border, tracheo non-border

Silikon-Schaumverband
Pansement hydrocellulaire silicone
Silicone Foam Dressing
Aposító de espuma y silicona
Ligadura esponjosa de silicone
Medicazione in schiuma di silicone
Siliconen schuimverband
Silikoné-skumforbinding
Silikonskumförband
Silikon-skumbandasje
Silikonniwaahtosidos
Silikonový pěnový obvaz
Silikónový pěnový obvaz
Sziklon habkötés
Opatrunek z pianki z warstwą silikonu
Obloga iz silikonske pene
Povoj sa silikonskom pjeno
Αρωδες ολικονουχο επιθεμα
Silikonlu köpük yara örtüsü
ضمادة السيليكون الإسفنجية



de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

Suprasorb® P sensitive non-border besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum und einer Trägerschicht. Der dreischichtige Aufbau ermöglicht ein dynamisches Flüssigkeitsmanagement für ein optimales feuchtes Wundmilieu, was zu einem schnelleren Wundverschluss führt und dazu beiträgt kann, das Mazerationsrisiko zu verringern. Die weiche Silikonsschicht kann angeheben und neu positioniert werden, ohne Ihre Haftfähigkeit zu verlieren. Außerdem können mithilfe dieser Schicht die Schmerzen des Patienten sowie das Trauma für die Wunde und die Wundumgebungshaut beim Verbandwechsel minimiert werden. Die Polyurethan-Schaumschicht sorgt für eine hervorragende Absorption und schließt Exsudat ein.

Anmerkung

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Lagerung und Entsorgung

1. Im angebenen Temperaturbereich sauber und trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
2. Die Entsorgung sollte gemäß den lokalen Umweltvorschriften erfolgen.


Zweckbestimmung

Der Suprasorb® P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur

Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt sich um

 mittel exsudierende und

 oberflächliche bis

 tiefe* Wunden:

Indikationen

- Dekubitus
 - Bein- und Fußulzera
 - traumatische Wunden
 - Hautrisse
- Suprasorb® P sensitive tracheo non-border kann zur Abdeckung von Hautarealen um Trachealkanülen und andere Drainagen verwendet werden.

Kontraindikationen

Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten

Anwendungshinweise

Kann unter Aufsicht von Fachpersonal von Laien angelegt werden. Das Produkt kann unter Kompressionsverbänden verwendet werden.

1. Vorbereiten der Wunde
Die Wunde nach den bestehenden klinischen Standards reinigen. Die Wundumgebungshaut gründlich trocknen.
2. Anlegen des Wundverbandes
a. Die Größe des Verbandes richtet sich nach der Größe der Wunde. Das Wundkissen sollte die trockene Wundumgebungshaut um mindestens 1–2 cm überlappen.
b. Die erste Schutzfolie entfernen und die haftende Seite auf die Wunde aufbringen.

c. Die übrigen(i) Schutzfolie(n) entfernen und den Verband auf der Haut glatt streichen. Den Verband nicht auseinanderziehen.
d. Wenn die Beschädigungen in der Wunde und um die Wunde herum als Primärverband (z. B. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquecel).

3. Verbandwechsel

Der Verband kann abhängig vom Wundzustand und Exsudationsgrad mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.

zuschneiden • découperable - can be cut to size • se puede cortar a la medida - poate ser recortat la mēdă - ritagliabile - kan op maat worden geknipt - kan tilläpjas - kan klippas - kan klippes til - voidaan leikata - lze přistřihnout - je možné přistřihnout - mēreite vāghāto - mozná poryciz - lahko se prirezi - može se rezati - κόβεται στο επιθυμητό μήκος • угуун буйта кестилбэл - حسب الحاجة حسب القياس المناسب قابل للقص حسب الحاجة حسب القياس المناسب

STERILE | EO | 