

GIUNEO® plus+

Blutzuckermessgerät für
die Selbstanwendung

Gebrauchs-
anweisung



OSANG Healthcare infopia

Danke, dass Sie sich für GluNEO® plus entschieden haben

Diese Gebrauchsanweisung enthält alles was Sie über das GluNEO® plus Blutzuckermessgerät wissen müssen. Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit, um die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen.

Selbsttests des Blutzuckerspiegels bieten eine Möglichkeit, Ihren Diabetes zu kontrollieren. GluNEO® plus wurde entwickelt, um Ihnen ein schnelles und genaues Ablesen zu ermöglichen. Unser Anspruch für das GluNEO® plus Blutzuckermesssystem ist, Ihnen ein Gesundheitsprodukt von bester Qualität zu bieten. Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt, bevor Sie Änderungen an Ihrem Diabetes-Management vornehmen. Das GluNEO® plus Blutzuckermesssystem ist nur für die In-Vitro-Diagnostik (IVD) bestimmt.

Bitte die Gebrauchsanweisung in Ruhe vor dem ersten Test durchlesen.

Wichtige Information

Das GluNEO® plus Blutzuckermesssystem ist für die Verwendung außerhalb des Körpers vorgesehen (nur für In-vitro-Diagnostik). Es sollte nur zum Testen des Blutzuckers mit frischen Vollblutproben (kapillar und/oder venös) verwendet werden. Es sollte nicht zur Diagnose von Diabetes verwendet werden. Fragen Sie Ihren Arzt nach der täglichen Behandlung Ihres Diabetes und der ordnungsgemäße Verwendung des Blutzuckermessgeräts. Bitte achten Sie beim Umgang mit Blut genau darauf, dass es nicht zu Verunreinigungen kommt. Unsachgemäße Verwendung kann Ihre und die Gesundheit anderer ernsthaft gefährden. Das GluNEO® plus Blutzuckermesssystem enthält kleine Teile, die beim Verschlucken eine Erstickengefahr für Kinder darstellen können. Daher von Kindern fern halten.

Funktionsweise

Die Funktion der GluNEO® plus Blutzuckerteststreifen basiert auf der Glukosedehydrogenase. Das FAD-GDH (Enzym) reagiert quantitativ mit der Glukose im Vollblut und dem Blutzuckermessgerät. Es wird der elektrische Strom gemessen, der aus der Reaktion der Reagenz des Teststreifens mit der Glukose erzeugt wird. Glukose in der Vollblutprobe reagiert mit dem Reagenz des Teststreifens und erzeugt einen elektrischen Strom. Die Stärke des elektrischen Stroms hängt zusammen mit der Glukose im Blut. GluNEO® plus misst den Strom, berechnet den Blutzuckerspiegel und zeigt dann das Messergebnis an.

WARNUNG

- Alle Teile des Sets können mit Blut infiziert sein und Krankheiten übertragen - selbst nach Reinigung oder Desinfektion.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Handlotions oder Öl der Lanzetten und Teststreifen.
- Beachten Sie bitte bzgl. der Reinigung und Desinfektion die Seite 29 der Gebrauchsanweisung.
- Ändern Sie nicht Ihre Medikation aufgrund von GluNEO^{plus} Messergebnissen ohne Ihren Arzt zu fragen.
- Nicht das Gerät aufschrauben
- Das Blutzuckermess-Gerät nicht der Sonne aussetzen.

ACHTUNG

- Bitte das Blutzuckermess-Gerät und die Teststreifen von Kindern fern halten.
- Das Gerät von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit fern halten.
- Das Gerät von Dreck und Staub fern halten.
- Das Set immer sorgfältig beobachten, wenn Kinder oder Andere in der Nähe sind.
- Das Set nicht in Flüssigkeit tauchen und auch nicht so abstellen, dass es in Flüssigkeit fallen könnte oder ansonsten nass werden könnte.
- Keine Teile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Nichts auf das Blutzucker-Messgerät stellen.

BITTE BEACHTEN:

- Bitte für die Gewinnung des Blutstropfens immer eine neue Lanzette verwenden. Lanzetten sind nur für den einmaligen Gebrauch gedacht.

Inhaltsverzeichnis

Das Blutzuckermess-Gerät kennen lernen	
Einsatzbereich des Blutzucker-Messgeräts	5
Das GluNEO® plus Set enthält	6
GluNEO® plus Messgerät	7
GluNEO® plus Display	8
GluNEO® plus Teststreifen	9
Vor Testbeginn Einstellen des Messgeräts	10
Automatische Codierung	12
Durchführung eines Tests mit der Kontroll-Lösung	13 - 16
Durchführung Ihres Tests	
Vorbereiten der Blutstropfengewinnung	16 - 17
Durchführen eines Tests mit dem Blutstropfen	18 - 21
Funktion des Auswurfschiebers	22
Betrachtung Ihres Testergebnisses	
Betrachten des Ergebnis	23
Betrachten Ihrer durchschnittlichen Ergebnisse	23
Betrachten Ihres Ergebnis mit aktivierter user ID	24
Löschen eines Testergebnis	24
Alternative Stellen für die Blutstropfengewinnung	
Stechen und Gewinnung des Blutstropfens an alternativen Stellen	25 - 27
Gebrauch eines Blutstropfens an alternativer Stelle.	27 - 28
Pflege Ihres GluNEO® plus Systems	
Reinigen und Wartung Ihres Blutzucker-Messgeräts	29
Aufbewahrung Ihres GluNEO® plus Systems	30-31
Übertragen Ihrer Testergebnisse	31
Einlegen der Batterie	32
Entsorgung des Geräts und der Batterie	33
Fehlerbehebung	34 - 36
Unerwartete oder nicht zu erklärende Testergebnisse	37
Garantie	38
Spezifikation	39
Bedeutung der Symbole	40

Das System Kennenlernen

Vorgesehener Gebrauch des Blutzucker-Messgeräts

Das GluNEO®plus Blutzuckermessgerät ist für die quantitative Blutzuckermessung mit frischem Vollblut-Proben aus der Fingerbeere oder venös vorgesehen. Es sollte nicht für die Diagnose von Diabetes verwendet werden, auch nicht für die Messung bei neugeborenen Babies. GluNEO®plus ist für die Verwendung ausserhalb des Körpers vorgesehen -in-vitro- diagnostische - Anwendung (IVD).

Das GluNEO® plus Blutzuckermessgerät ist für die Messung privat zuhause oder durch medizinisches Fachpersonal gedacht.

Ihre Messergebnisse erleichtern dem Arzt die Beratung und Medikation.

Das regelmässige Messen darf auf keinen Fall die Betreuung durch Ihren Arzt ersetzen.

ACHTUNG

- Verwenden Sie das Blutzuckermessgerät nur für die Messung des Blutzuckerspiegels.
- Cholesterin Konzentrationen > 510 mg/dL or Triglycerid Konzentrationen > 3,400 mg/dL können erhöhte Messergebnisse zur Folge haben.
- Icodextrin stört bei der Verwendung mit GluNEO® plus Teststreifen.
- Nicht während oder kurz nach dem Xylose-Absorptionstest verwenden. Xylose im Blut verursacht Störungen.
- Bevor Sie ein Bestandteil des Sets benutzen, bitte vorher die Gebrauchsanweisung lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Diabetiker nach der täglichen Behandlung Ihres Diabetes und der ordnungsgemässen Verwendung des GluNEO® plus Messgeräts.

BITTE BEACHTEN:

- Lesen Sie vor der Verwendung des GluNEO® plus Systems alle Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung und üben Sie das Testverfahren. Lassen Sie sich durch Fachleute über die Anwendung beraten.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Blutzuckerwerte zu niedrig oder zu hoch sind oder wenn die Ergebnisse zweifelhaft sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Wenn Ihr Blutzuckerergebnis ungewöhnlich niedrig oder hoch ist oder Sie das Ergebnis nicht für richtig halten, wiederholen Sie den Test erneut mit einem neuen Teststreifenstrip.
- Wenn die Ergebnisse immer noch ungewöhnlich sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie eine Entscheidung zur Kontrolle Ihres Diabetes treffen Entscheidung zur Kontrolle Ihres Diabetes treffen.


Das GluNEO®plus Set enthält



1. GluNEO® plus Messgerät
2. GluNEO® plus Teststreifen (nur optional)
3. Stechhilfe (nur optional)
4. Lanzetten (nur optional)
5. Gebrauchsanweisung
6. Garantiekarte
7. Transporttasche
8. Tagebuch
9. 1EA 3V Coin Batterie (CR2032)

Achten Sie darauf, dass das Siegel Ihrer Verpackung des GluNEO®plus Blutzuckermessgeräts nicht beschädigt wurde.


GluNEO® plus Blutzuckermessgerät

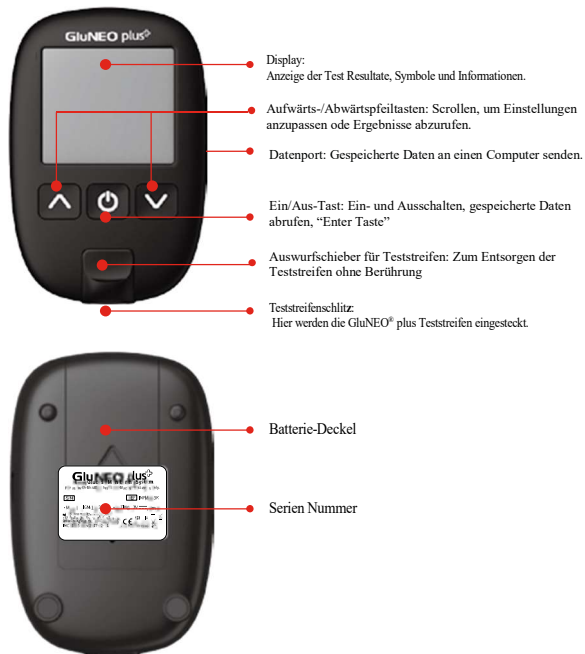

ACHTUNG


- Verwenden Sie GluNEO plus nicht in zu trockener Umgebung, insbesondere wenn synthetische Materialien in der Nähe sind, die sich aufladen könnten.
- Verwenden Sie GluNEO plus nicht in der direkten Nähe von Mobiltelefonen, schnurlosen Telefonen, oder andere Geräte, die elektromagnetische Strahlenquellen darstellen. Diese können den ordnungsgemäßen Betrieb des Blutzuckermessgerätes beeinflussen.

GluNEO® plus Display

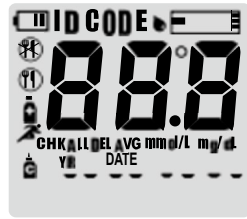

-  Batterie zu niedrig
-  Alarm Symbol
-  Symbol Fehlerbehebung
-  Löschen der Ergebnisse
-  Durchschnitt der Ergebnisse
-  Vor einer Mahlzeit
-  Nach einer Mahlzeit
-  Nach der Medikamenteneinnahme
-  Nach dem Sport
-  Symbol Kontroll-Lösung
-  Blutstropfen Symbol
-  Benutzer ID Symbol
-  Test Streifen Code Symbol
-  Masseinheit vom Messergebnis
-  Temperatur / Datum
-  Zeit / Testergebnis

GluNEO[®] plus Teststreifen

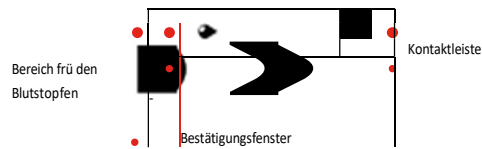

ACHTUNG

- Bewahren Sie die GluNEO[®] plus Teststreifen kühl und trocken. Von Sonnenlicht fern halten. Nicht einfrieren.
- Teststreifen in der originalen Testdose aufbewahren. Nicht in andere Behälter umfüllen.
- Nach dem Herausnehmen eines Teststreifens die Dose gleich wieder verschliessen.
- Notieren Sie das Ablaufdatum, das sechs Monate nach dem ersten Öffnen der Dose liegt, direkt nach dem Öffnen auf der Dose. Nach dem Ablaufdatum die Teststreifen nicht mehr benutzen.
- GluNeo[®] plus Teststreifen nur einmal benutzen. Wiederholungsmessung immer mit neuem Streifen!
- Nicht bei Temperaturen unter 10°C(50°F) oder über 40°C(104°F) benutzen.
- Nicht testen, wenn die Feuchtigkeit sich unter 10% oder über 90% befindet.
- Biegen, schneiden oder verändern Sie die Teststreifen nicht.
- Vermeiden Sie das Schmutz, Lebensmittel, Flüssigkeiten auf die Teststreifen geraten.
- Unbedingt vermeiden, dass die Kontaktleiste verschmutzt wird.
- Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung zu den GluNEO[®] plus Teststreifen.
- Niemals andere als die GluNEO[®] plus Teststreifen verwenden.

Vor dem Testen

WARNUNG

- Tipps, um Infektionen zu vermeiden.
- Lanzetten und Lanzetten-Stechhilfe niemals mit anderen teilen.
 - Immer eine neue Lanzette und einen neuen Teststreifen verwenden.
 - Üben Sie mit der Stechhilfe, so dass Sie mit dem Umgang vertraut werden.
 - Lanzetten und Teststreifen nur einmal verwenden.
 - Waschen Sie Ihre Hände mit Seife in warmen, laufendem Wasser, bevor Sie mit dem Test beginnen
 - Vermeiden Sie, dass Öl, Handlotion, Seife, Schmutz... auf die Lanzetten oder Stechhilfen gelange.
 - Nach dem Waschen die Hände gründlich trocknen.

Einstellen des Blutzuckermessgeräts

Mit dem GluNEO[®]plus Blutzuckermessgerät kann man verschiedene Funktionen auswählen. Im Einrichtungsmodus können sie Aktivitäts- / Essenflags aktivieren. Datum / Uhrzeit einstellen, drei Durchschnittswerte festlegen und bis zu fünf tägliche Alarmer einrichten.



An-Taste
Taste 3 Sekunden
drücken

Benutzer Aktivität
Nach dem anhaltenden
Drücken or der Tasten
die Aktivität einstellen und
 Taste drücken.

Benutzer ID
Nach anhaltendem Drücken der
 oder Tasten die Benutzer ID.
auswählen und diese
Taste drücken.



Jahr
Nach dem drücken der oder
oder Tasten erscheint
Jahr und bestätigen.

Datum / Zeit
Nach dem Drücken der oder
 Tasten erscheint
einstellen u. bestätigen:






Temperatur

Nach Drücken der Tasten ▲ or ▼ C or °F wählen und mit der Taste ⏻ bestätigen.

Durchschnittstage - Nach Drücken der ▲ oder ▼ Tasten, die Anzahl der Tage für die durchschnittliche Berechnung wählen und diese ⏻ drücken

Alarm an/AUS

Nach dem Drücken der ▲ oder ▼ Tasten An/Aus wählen und mit der ⏻ Taste bestätigen

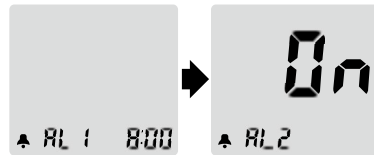

Alarm Zeit

Nach dem Drücken der ▲ oder ▼ Tasten, Alarmzeit einstellen und bestätigen. ⏻

Alarm


Nach dem Programmieren der Anzahl der Alarme, diese mit der Taste bestätigen. (5 Alarme sind möglich).

ACHTUNG

- SEHR WICHTIG: Stellen Sie das richtige Testgerät ein. Ihr GluNEO® plus Messgerät ist als Testeinheit auf mg/dl voreingestellt. Eine falsche Testeinheit führt zu einer falschen Anzeige der Testergebnisse. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, welche Einheit Sie verwenden sollen. Ohne die richtige Einstellung des Datums werden der durchschnittliche Glukosespiegel und die Ergebnisse im Speicher nicht richtig angezeigt. Es wird empfohlen, das Glukosetestmessgerät vor dem Gebrauch und auch beim einsetzen neuer Batterien einzustellen.
- Um das Messgerät auszustellen, die ⏻ Taste 3 Sekunden drücken .

Während des Einstellens des Blutzuckermessgeräts kann nicht getestet werden.

Automatische Codierung

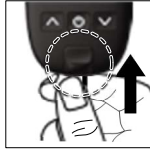

1. Das GluNEO®plus hat eine automatische Codierung (e.g.125)



2. Die Codierung wird automatisch erkannt. Dadurch muss die Codenumber nicht jedesmal am Blutzuckermessgerät eingestellt werden. Die Codenumber, die auf der Teststreifendose abgedruckt ist, muss mit der Codenumber, die am Blutzuckermessgerät angezeigt wird, übereinstimmen.

ACHTUNG


- Biegen Sie die Teststreifen nicht. Es kann zu Fehlern bei der automatischen Codierung führen.
- Wenn die Codeerkennung am Teststreifen beschädigt sein sollte, funktioniert die automatische Codierung evtl. Nicht. Überprüfen Sie bitte die Code-Nummer, die am Display angezeigt wird mit der Code-Nummer der Teststreifendose.

Den Test mit der Kontrollflüssigkeit durchführen

Die GluNEO®plus -Kontrolllösung enthält eine festgelegte Menge an Glukose. Diese reagiert mit dem GluNEO®plus-Teststreifen. Durch Vergleichen der Testergebnisse Ihrer Kontrolllösung, angezeigt am Display, mit dem Zielbereich auf dem Label der Teststreifen, können Sie überprüfen, ob Messgerät und Teststreifen ordnungsgemäß funktionieren und die Testdurchführung korrekt verläuft

Die Kontrolllösung sollte verwendet werden:


- Bevor Sie eine neue Teststreifen-Dose anbrechen.
- Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Blutzuckermessgerät oder die Teststreifen nicht richtig funktionieren.
- Wenn die Messergebnisse nicht mit Ihren Symptomen übereinstimmen oder wenn Sie der Meinung sind, dass das Messergebnis nicht korrekt ist.
- Wenn Ihnen das Blutzuckermessgerät hingefallen ist.
- Zur Qualitätskontrolle im point of care Einsatz – im Pflegebereich etc.
- Um das Gerät kennenzulernen oder anderen die Funktionsweise zu zeigen.
- Bevor Sie das Blutzuckermessgerät nach einer Reinigung der Desinfektion wieder verwenden.

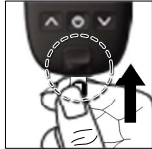


Führen Sie den Teststreifen mit Pfeilrichtung bis zum Anschlag in den Schlitz des Blutzuckermessgerätes herein.
Bitte schieben Sie den Blutzucker-Teststreifen nicht verkehrt herum herein.




Sobald Sie den Teststreifen in den Aufnahmeschlitz bis zum Anschlag hineinschieben, startet das Blutzuckermessgerät automatisch.

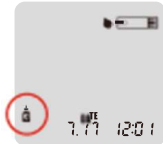

Drücken Sie kurz die ▲ oder ▼ Taste, bis dann das Symbol Kontroll-Flasche erscheint. Dann  bestaetigen().



1. Überprüfen Sie das Ablaufdatum, bevor Sie einen Kontrolllösungstest durchführen. Nicht verwenden, wenn bereits abgelaufen.
Bitte beachten Sie das auf der Kontrolllösungsflasche angegebene Verfallsdatum.

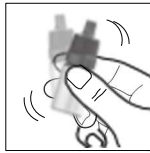

2. Die Kontrolllösungsflasche kurz vorher schütteln.



3. Den ersten Tropfen der Kontrolllösung verwerfen. Dadurch werden alte Rückstände beseitigt. Geben Sie einen Tropfen der Kontrollflüssigkeit auf eine saubere trockene Oberfläche (z.B. den Deckel der Kontrolllösungsflasche).



4. Tauchen Sie den Teststreifen in die Kontrolllösungsflüssigkeit. Die Ergebnisse werden in 5 Sekunden angezeigt. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Bereich, der auf der Flasche der Kontrolllösung angegeben ist. Das Ergebnis muss in diesen Bereich fallen.

ACHTUNG

- Die Kontrolllösung ist nur für die In-Vitro-Diagnostik gedacht.
- Die Kontrolllösung wurde exklusiv für das GluNeo®plus Blutzuckermesssystem hergestellt. Niemals eine Kontrolllösung eines anderen Herstellers verwenden.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum. Niemals nach Ablauf verwenden.
- Nach dem ersten Öffnen nur 33 Monate haltbar. Beachten Sie das Ablaufdatum, eingetragen auf dem Etikett des Fläschchens. Niemals nach dem Ablaufdatum verwenden.
- Nicht schlucken. Es ist nicht geeignet als Lebensmittel für Menschen oder Kinder.
- Das Symbol für einen Test mit der Kontrolllösung wird im Display mit "C" angegeben. Dadurch wird der Unterschied zwischen einer Messung mit der Kontrolllösung und eines Blutstropfens deutlich.

Als Beispiel

Wenn Sie die Kontrolllösung benutzen, müsste das Testergebnis für diese hier abgebildete Teststreifendose zwischen 80 und 120 liegen.



Bitte beachten, das sind lediglich Werte für eine Kontrolllösung, keine Blutzuckerwerte.

BITTE BEACHTEN:

- Die Kontrolllösung möglichst vor dem Test aufbewahren zwischen 20-25°C (68-77°F).
- Überprüfen Sie das Ablaufdatum bevor Sie einen Test mit der Kontrolllösung beginnen.
- Nicht verwenden, wenn nach dem ersten Öffnen 3 Monate vergangen sind.

Wenn Ihr Kontrolllösungstest außerhalb des Bereichs liegt, beachten Sie bitte die nächsten Schritte, bevor Sie sich an Ihren Händler wenden:

- Überprüfen Sie die Verfallsdaten aller von Ihnen verwendeten Produkte. Stellen Sie sicher, dass Sie die GluNEO@plus Kontrolllösung verwenden.
- Versuchen Sie es mit einem neuen Kontrolllösungstest. Wenn dieser Test außerhalb des Bereichs liegt, versuchen Sie einen erneuten Kontrolllösungstest mit einer neuen, ungeöffneten Dose Teststreifen. Führen Sie keinen Glukosetest durch, wenn Sie weiterhin Kontroll-Lösungs Ergebnisse erhalten, die außerhalb des Bereichs liegen. Bitte rufen Sie in diesem Fall Ihren Händler an.

Folgemassnahme

1. Überprüfen Sie Ihr Blutzuckermessgerät und Teststreifen mit der Kontrolllösung.
2. Führen Sie Ihren Test erneut durch.

ACHTUNG

- Wenn Ihre Glukosekontrolllösung außerhalb des Bereichs liegt, führen Sie keinen Blutzucker-Test durch und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter.
- Der Messbereich der Glukosekontrolllösung hat nichts mit dem Blutzuckerspiegel einer Person zu tun, da der einzige Zweck darin besteht, den Status des Teststreifens und des Messgeräts zu überprüfen. Entsorgen Sie die verwendete Kontrolllösung und die Teststreifen gemäß den örtlichen Vorschriften sorgfältig.

Durchführen des Blutzuckertests


Blutstropfengewinnung

Die Stechhilfe, ein Medizinprodukt, hilft bei der Gewinnung von Kapillarblutproben zur Blutzuckermessung oder für andere Tests, für die ein oder zwei Blutstropfen erforderlich sind. Die Stechhilfe bietet entsprechende Sicherheit und Komfort für die Entnahme von Blutproben. Eine verstellbare Spitze bietet 5 verschiedene Stechtiefen für die individuellen Hauteigenschaften. Der Lanzetenauswurf dient zur sicheren Entsorgung der gebrauchten Lanzette. Ausserdem ermöglicht die Stechhilfe die Blutstropfengewinnung an alternativen Stellen (AST).

ACHTUNG

- Benutzen Sie niemals eine Lanzette, die ein Anderer bereits benutzt hat. Gefahr von Infektionen.
- Falls die Stechhilfe auch von einer anderen Person benutzt wird, sollte eine gesonderte Spitze verwendet werden.
- Niemals eine gebrauchte Lanzette in der Stechhilfe belassen.
- Immer eine neue Lanzette verwenden!!
- Achtung: Die kleinen Bestandteile der Stechhilfe könnten von Kindern verschluckt werden.
- Bei der Verwendung im Krankenhaus sollten die eigens aufgestellten Regeln beachtet werden, um Infektionen zu verhindern.
- Entsorgen Sie gebrauchte Lanzetten in einem verschliessbaren Behälter.

Bestandteile

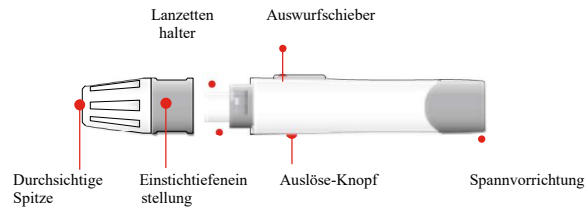

Verwendung der klaren Spitze für alternative Stellen (AST)

Verwenden der klaren Spitze (AST)

1. Platzieren Sie die Stechhilfe mit der Lanzette auf den ausgewählten Hautbereich, halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann den Entriegelungsknopf, um eine Blutprobe zu erzeugen.
2. Beobachten Sie die klare Spitze, bis eine ausreichende Blutprobe entnommen wurde. Wenn nicht genügend Blut vorhanden ist, massieren Sie den Bereich sanft, bis eine ausreichende Blutprobe vorliegt.

Aufbewahrung

Produkte müssen bei Raumtemperatur gelagert werden, geschützt vor Sonnenlicht oder Feuchtigkeit.

Reinigung und Desinfektion


- Reinigen und wischen Sie den äußeren Teil des Stechgeräts mindestens einmal pro Woche mit einem weichen Tuch ab, das mit milder Seife und Wasser angefeuchtet ist. Waschen Sie die verstellbare und klare Spitze einmal pro Woche mit milder Seife.
- Tauchen Sie das Stechgerät nicht in Wasser oder Flüssigkeit.

Garantie

Die Stechhilfe hat eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Ein fehlerhaftes Gerät können Sie an Ihren Händler zurücksenden.

Blutstropfengewinnung an der Fingerspitze

Schritt 1

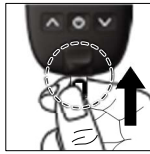

Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung auf dem Teststreifen fest in den Schlitz des Messgeräts ein. Bitte legen Sie den Glukoseteststreifen nicht verkehrt herum ein.



Wenn Sie den Blutzuckerteststreifen in das Blutzuckermessgerät einlegen, schaltet sich das automatisch mit dem entsprechenden Code ein und zeigt die Temperatur an. Stellen Sie sicher, dass die Codenummer mit der Teststreifendose übereinstimmt (z. B. 125). GluNEO®plus erkennt automatisch die Codenummer des Teststreifens und passt das Messgerät entsprechend an.



Oben auf dem Display wird ein blinkender Teststreifen angezeigt. Er zeigt an, dass das Messgerät zum Testen bereit ist.

ACHTUNG


- Wenn der Code nach einiger Zeit nicht mehr angezeigt wird, ziehen Sie den Glukoseteststreifen aus dem Anschluss und starten Sie den Vorgang von vorne.
- Wenn der Code auf dem Display und der Dose der Blutzuckerstreifen nicht übereinstimmen, versuchen Sie es mit einem anderen neuen Teststreifen. Wenn die Nichtübertragung weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Vermeiden Sie das Blutzuckermessen unter direkter Sonne.
- Wenn Sie Ihre Blutsprobe zu früh auftragen, wird das "Er5" Symbol auf dem Display angezeigt - siehe Seite 35.

Schritt 2

Wie Sie einen Blutstropfen gewinnen

Bevor Sie einen Blutstropfen erzeugen, waschen Sie sich bitte Ihre Hände mit warmen, klarem Wasser und Seife. Anschließend, vor Testbeginn, die Hände trocknen.


- Alle Teile des Sets können mit Blut in Berührung gekommen sein und dadurch Infektionskrankheiten übertragen.
- Vermeiden Sie, dass Schmutz oder andere Verunreinigen an die Lanetten gelangen.
- Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit warmen Wasser und Seife, bevor Sie mit der Stechhilfe beginnen.

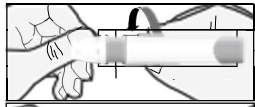


1. Schrauben Sie die Spitze der Stechhilfe ab.



2. Stecken Sie eine ungebrauchte Lanzette in die Stechhilfe.

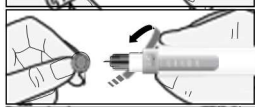


3. Schrauben Sie die Schutzkappe ab. Nicht wegwerfen!

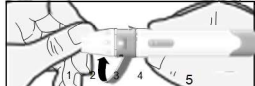


4. Die Spitze wieder aufstecken und festschrauben.



5. Stellen Sie die Tiefe ein: Verwenden Sie 1-2 für dünne Haut, 3 für durchschnittliche Haut und 4-5 für sehr dicke, schwierige Haut.

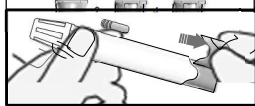


6. Das Ende der Stechhilfe in die abgebildete Richtung ziehen.

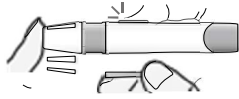

ACHTUNG

- Wenn das Blut verschmiert oder fließt, verwenden Sie keine solche Blutprobe. Trocknen Sie den Bereich und drücken Sie vorsichtig einen weiteren Tropfen oder punktieren Sie einen neuen Bereich des Fingers
- Teilen sie die Stechhilfe niemals mit Anderen.

Schritt 3

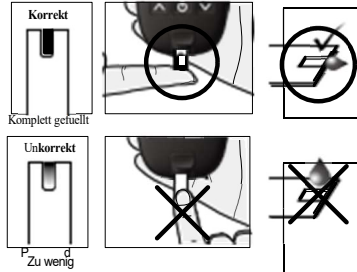

Das GluNeo®plus Messgerät benötigt einen sehr kleinen Blutstropfen – nur 0,5 ul gross

- Halten Sie den Teststreifen an den Blutstropfen.
- Das Blut wird automatisch in den Teststreifen hineingezogen.
- Sobald ausreichend Blut eingezogen wurde, wird das Blutzuckermessgerät automatisch starten.
- Halten Sie den Finger mit dem Blutstropfen so lange an den Teststreifen, bis Sie einen Pipton hören.

Bitte beachten Sie die empfohlene Menge an Blut. Zu viel Blut kann zu Fehlfunktionen Ihres Messgeräts führen.


ACHTUNG

- Wenn der Countdown nicht startet, fügen Sie dem Teststreifen kein weiteres Blut hinzu. Entsorgen Sie den Teststreifen und starten Sie den Test erneut.
- Wenn Sie den Test nicht innerhalb von 3 Minuten durchführen, schaltet sich das Blutzuckermessgerät automatisch aus, zum Schutz der Batterie. In diesem Fall sollte der Testvorgang wiederholt werden.
- Sie können ein ungenaues Ergebnis erhalten, wenn die Blutprobe nicht vollständig gefüllt ist.


Schritt 4



Nach dem Piepton beginnt der Test automatisch und Ihre Ergebnisse werden in 5 Sekunden angezeigt. Im LCD-Display wird der Countdown von 5 bis 1 Sekunde beginnen. Das LCD-Fenster zeigt das Ergebnis Ihres Blutzuckerspiegels, Ihrer Temperatur und Ihrer Zeit an.

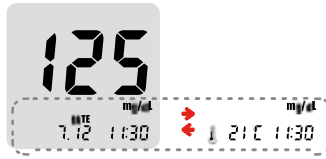

- Wenn Sie die Aktivitäten-Option gewählt haben, drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste und Aktivität () die Ihren Aktivitäten entspricht und dann diese Taste drücken.
- Wenn Sie keine Aktivität angeben wollen, drücken Sie gleich diese Taste:

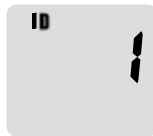


- Wenn Sie die Benutzer ID Option gewählt haben, ▲ und ▼ drücken, Benutzer ID auswählen u.Taste drücken
- Notieren Sie den Ergebniswert in Ihrem Logbuch. Wenn der Glukoseteststreifen entfernt wird, schaltet sich das Glukosetestmessgeräe automatisch aus.

VORSICHT


- Wenn das Messergebnis ausserhalb der möglichen Bereiche liegt, erscheint "HI/LO" im Display.
- Entsorgen Sie Blutzuckerstreifen und Lanzetten entsprechend der örtlichen Entsorgungsregeln.

Funktion des Auswurfschiebers

Entsorgen des gebrauchten Teststreifens

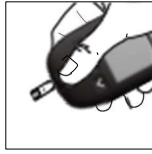


1. Nach dem Test schieben Sie den Auswurfschieber nach vorne, um den Teststreifen zu entfernen.

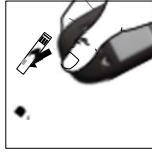

2. Die gebrauchten Teststreifen und Lanzetten sind potentiell infektiös. Diese bitte niemals herum liegen lassen, sondern sicher verwahren. Bezüglich der Entsorgung bitte die lokalen Abfallbeseitigungsvorschriften beachten.

Entsorgung der Lanzetten

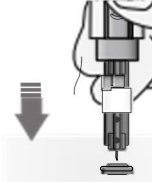

1. Die Nadelspitze der gebrauchten Lanzette in die Schutzkappe stecken.



2. Die Lanzette anschliessend herausziehen und ordnungsgemäss entsorgen.

ACHTUNG

- Den Auswurfschieber vorsichtig und nicht zu stark nach vorne drücken.
- Das Blutzuckermessgerät immer vorsichtig bedienen.
- Bitte für gebrauchte Teststreifen und Lanzetten die örtlichen Entsorgungsrichtlinien beachten.

Datenspeicher/Durchschnittswerte

Das GluNEO®plus-Messgerät speichert bis zu 365 Testergebnisse in seinem integrierten Speicher sowie den durchschnittlichen Glukosespiegel für die Anzahl der Tage, die Sie für die Berechnung des Glukosetestmessgeräts voreingestellt haben.

Aufrufen einzelner Messergebnisse aus dem Datenspeicher




Taste drücken \odot und loslassen. Das aktuellste Ergebnis wird zuerst angezeigt. Notieren Sie die Uhrzeit und den Tag Ihres Blutzuckerergebnisses. Drücken Sie kurz die Taste ∇ und Ihr vorheriges Ergebnis wird auf dem Display angezeigt.


Aufrufen der Durchschnittswerte aus dem Datenspeicher


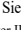


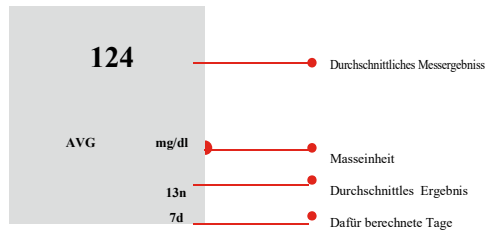

Drücken Sie kurz die \blacktriangle Taste und Ihr durchschnittliches Ergebnis wird angezeigt.

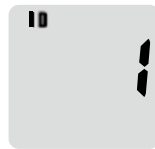

Überprüfung Ihrer Messergebnisse mit aktivierter Benutzer ID



Drücken  Taste einmal und die Benutzer ID Option wird im Display erscheinen.
Wenn Sie im Benutzer ID Modus sind  oder  Taste scrollen u. die korrekte Benutzer ID wählen. Dann die  Taste drücken.





Wenn Sie die Benutzer-ID auswählen, um die gespeicherten Ergebnisse zu überprüfen, werden nur die Ergebnisse der ausgewählten Benutzer-ID angezeigt

Testergebnisse löschen



Einzelne Messergebnisse löschen

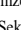

Um einzelne Testergebnisse zu löschen, drücken Sie  oder  Taste für 3 Sekunden. Dann wird **DEL** Symbol blinkend erscheinen. Nach dem dritten Signalton wird das ausgewählte Messergebnis gelöscht.




Alle gespeicherten Testergebnisse löschen

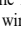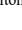Um alle Testergebnisse zu löschen,  and  3 Sekunden drücken. Dann wird **ALL DEL** blinkend angezeigt. Nach dem dritten Signalton werden alle gespeicherten Messergebnisse gelöscht

ACHTUNG

Gelöschte Messergebnisse können nicht wieder hergestellt werden. Bitte Vorsicht wenn Sie Daten löschen.

Alternative Teststellen

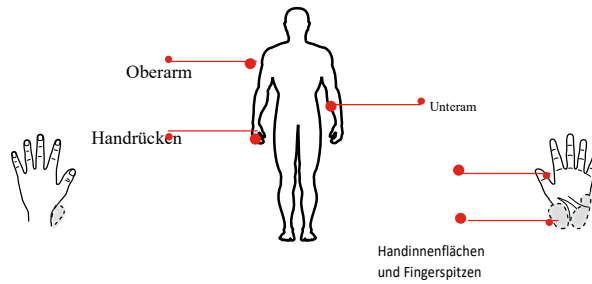

Mit dem Blutzuckermesssystem GluNEO®plus können Sie eine Blutprobe zum Testen Ihres Blutzuckers von verschiedenen Stellen Ihres Körpers entnehmen. Die obige Abbildung zeigt die Bereiche, in denen Sie mit Ihrem GluNEO® plus-Messgerät testen können. Unterarm, Oberarm, Handinnenfläche, Handrücken, Fingerspitzen.

Wichtig

Bei stabilen Blutzuckerwerten können Sie alternative Teststreifen verwenden – vor den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen. Wenn jedoch die Blutzuckerwerte stark schwanken, kann Blut aus der Fingerspitze diese Veränderungen früher anzeigen als Blut aus anderen Körperbereichen.


Einschränkung

1. Alternative Testergebnisse sollten niemals zur Kalibrierung kontinuierlicher Glukoseüberwachungssysteme verwendet werden.
2. Alternative Probenahmeergebnisse sollten niemals für Insulindosierungsberechnungen verwendet werden.

Gewinnung eines Blutstropfens an alternativen Teststellen


Wenn Sie Proben von Ihrem Oberarm, Unterarm, Ihrer Handfläche oder Ihrer Rückhand entnehmen, können Sie Ihre Fingerspitzen schonen. Möglicherweise ist die Entnahme einer Blutprobe von einer alternativen Stelle auch weniger schmerzhaft als die Verwendung einer Fingerspitze. Das Entnehmen einer Blutprobe von Ihrem Unterarm oder Ihrer Handfläche unterscheidet sich vom Entnehmen einer Blutprobe von Ihrer Fingerspitze.

Obere Hand/Handballen

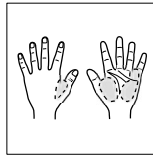


Wählen Sie einen fleischigen Bereich auf der Handinnenseite unter Ihrem Daumen oder kleinen Finger. Wählen Sie einen Punkt ohne sichtbare Venen und fern von tiefen Linien.

Oberarm

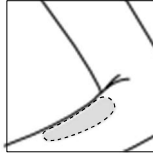


Unterarm

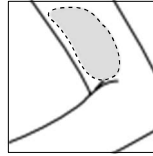

Wählen Sie einen fleischigen Bereich des Unterarms oder Oberarms, ohne Knochen, sichtbare Venen und dicken Haaren. Manchmal fließt in diesen Bereichen weniger Blut als in der Fingerspitze. Um genügend Blut zu erhalten, können Sie die Stelle vorher sanft einmassieren oder aufwärmen, um die Durchblutung zu erhöhen.

WICHTIG!!

Wir empfehlen, dass Sie immer an Ihren Fingerspitzen testen, wenn Sie feststellen möchten, ob eine Hypoglykämie (niedriger Blutzucker) oder Hyperglykämie besteht.

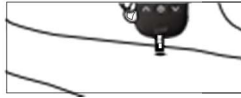


Reinigen Sie vorher die Teststelle mit Wasser und Seife, um genaue Ergebnisse beim Stechen Ihres Arms (Unterarm oder Oberarm) oder Ihrer Handfläche zu erzielen. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Teststelle keine Creme oder Lotion befindet. Trocknen Sie Ihre Hände und die Teststelle gründlich ab.


WARNUNG!

Um die Gefahr vor Infektionen zu vermeiden, niemals eine Lanzette oder die Stechhilfe mit Anderen teilen.


Die klare Spitze der Stechhilfe wird für das Testen an alternativen Stellen verwendet.

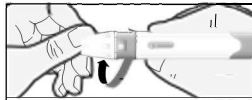


1. Drehen Sie die obere Spitze ab.

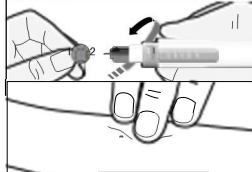

2. Schieben Sie die Lanzette herein und nehmen die klare Spitze.

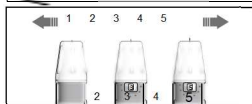


3. Um einen Blutstropfen zu erzeugen, reiben Sie die Teststelle einige Sekunden lang kräftig, bis Sie spüren, dass es warm wird. Das Anwenden von Wärme kann hilfreich sein.

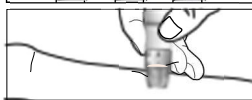


4. Stellen Sie die klare Spitze auf die höchste Einstellung ein. Halten Sie die klare Spitze gegen einen fleischigen Bereich an der alternativen Stelle. Drücken Sie die Entriegelungstast. Nicht anheben, weiter auf die Haut gedrückt.



5. Halten Sie die Stechhilfe weiter und erhöhen Sie langsam den Druck einige Sekunden lang.

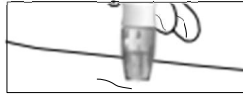

6. Während Sie das Stechgerät an Ihrer Teststelle weiter festhalten, schauen Sie durch die klare Spitze, bis ein Blutstropfen erscheint.

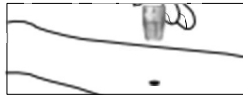

7. Heben Sie die Stechhilfe hoch. Dabei nicht den Blutstropfen berühren oder verschmieren.



8. Halten Sie das Blut an die Spitze des Teststreifens, es wird automatisch aufgesogen.

BITTE BEACHTEN!

- Vor dem erstmaligen Gebrauch von Blut an alternativen Stellen Ihren Arzt fragen.
- Wählen Sie immer eine andere Stelle. Wiederholtes Stechen an der gleichen Stelle kann Haut – und Gewebeerletzungen verursachen.
- Wenn an einer alternativen Stelle Verletzungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, eine Probe zu erhalten, ziehen Sie stattdessen eine Probenahme mit der Fingerspitze in Betracht.
- Teilen Sie niemals Ihre Stechhilfe mit Anderen.

ACHTUNG

Verwenden Sie kein Blut von alternativen Stellen wenn:

- Sie denken, dass Ihr Blutzuckerspiegel schnell sinken wird – Zum Beispiel innerhalb von 2 Stunden nach dem Sport, Injektion eines schnell wirkenden Insulins, Insulinpumpe-Bolus.
- Mit dem Blut der Fingerspitze können eine Hypoglykämie oder eine Insulinreaktion früher erkennen als z.Bsp. mit einer Unterarm – oder Handflächenprobe.

Reinigung und Wartung Ihres Messgeräts

Blutzuckermessgerät :

Ihr Blutzuckermessgerät erfordert keine besondere Wartung oder Reinigung. Vermeiden Sie, dass Schmutz, Staub, Blut, Glukosekontrolllösung oder Flüssigkeiten auf das Blutzuckermessgerät, den Testanschluss oder den Datenanschluss gelangen. Die Betriebstemperatur Ihres Blutzuckermessgeräts beträgt 10 bis 40 °C (50 bis 104° F). Es wird empfohlen, das Blutzuckermessgerät nach jedem Gebrauch in der mitgelieferten Tasche aufzubewahren.

Ein mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch kann verwendet werden, um den äusseren Teil des Blutzuckermessgeräts abzuwischen. Ihr GluNeo® plus Blutzuckermessgerät ist ein Präzisionsinstrument. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um.

Stechhilfe:

Reinigen Sie die Stechhilfe und die Spitze mit Seife und lauwarmen Wasser. Sie können die Stechhilfe auch mit einer Desinfektionslösung reinigen. Befeuchten sie ein Tuch mit dieser Lösung und wischen Sie die Stechhilfe gründlich ab. Nur die Spitze mindestens 30 Minuten in der Desinfektionslösung einweichen. Das Stechgerät nicht in Flüssigkeit einweichen. Spülen Sie die Stechhilfe und die Spritze mit Wasser ab und trocknen Sie sie gründlich ab.

1. Ausführliche Anweisungen zu GluNEO®plus Blutzuckerteststreifen finden Sie in der Verpackung der Blutzuckerteststreifen.
2. Bitte lagern Sie das GluNEO®plus Blutzuckermesssystem an einem kühlen und trockenen Ort ausserhalb der Reichweite von Kindern. Nicht einfrieren. Vermeiden Sie Tests unter direkter Sonneneinstrahlung.
3. Das Blutzuckermessgerät oder die Blutzuckerteststreifen nicht in Wasser oder Flüssigkeit einweichen.
4. Setzen Sie das Messgerät oder die Blutzuckerteststreifen keiner übermässigen Hitze aus.
5. Verwenden Sie Ihr Messgerät gemäss den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung.
6. Wenn Sie das Stechgerät, die Lanzetten oder die Blutzuckerteststreifen kaufen müssen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter.
7. Entsorgen Sie die gebrauchten Lanzetten sorgfältig, um Infektionen zu vermeiden.

Aufbewahrung Ihres GluNEO®plus Systems

Um Ihr Messgerät und Teststreifen vor Staub, Schmutz oder andere Verunreinigungen zu schützen, bitte waschen Sie Ihre Hände vor Gebrauch gründlich und anschließend abtrocknen.

Aufbewahrung des Messgeräts

- Aufbewahrungstemperatur: 2-30°C oder 36-86°F (Temperatur)
- Verwahren Sie das Blutzuckermessgerät und transportieren Sie das Gerät immer in der Transporttasche.
- Vermeiden Sie das Herunterfallen.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Feuchtigkeit.

Test Streifen Aufbewahrung

- Aufbewahrungstemperatur: 2-30°C oder 36-86°F (Temperatur)
- Teststreifen immer nur in der original Dose aufbewahren.
- Teststreifen kühl und trocken aufbewahren. Kein direktes Sonnenlicht.
- Nicht einfrieren.
- Nach dem Herausnehmen eines Teststreifens die Dose gleich verschliessen.
- Notieren Sie das Ablaufdatum (2 Jahre nach Herstellung) gebrauchen.
- Teststreifen immer mit sauberen und trockenen Händen anfassen.
- Niemals Teststreifen 6 Monate nach dem öffnen der Dose gebrauchen.

Aufbewahrung der Kontrolllösung

- An einem kühlen, trockenen Ort lagern, Temperatur zwischen 8-30°C oder 46-86°F. Nach dem Gebrauch gleich verschliessen.
- Achten Sie immer darauf, dass das Fläschchen fest verschlossen ist.
- Notieren Sie das Ablaufdatum (Öffnungsdatum plus 3 Monate) auf dem Fläschchen.
- Nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
- Das Verfallsdatum beginnt 24 Monate nach der Herstellung.
- Nach dem öffnen ist die Kontrollflüssigkeit nur 3 Monate verwendbar.

ACHTUNG

- Die GluNEO®plus Teststreifendose trocken und kühle aufbewahren. Keine direkte Sonne. Nicht einfrieren.
- Teststreifen nur in der original Dose aufbewahren. Niemals mischen oder aufbewahren in versch. Dosen.
- Die Teststreifendose nach Entnahme des Teststreifens sofort verschliessen.
- Notieren Sie das Ablaufdatum (6 Monate nach dem ersten öffnen der Teststreifendose). Entsorgen Sie bitte GluNEO®plus Teststreifen nach dem Ablaufdatum.
- Niemals Teststreifen nach dem Verfallsdatum benutzen.
- Keinen test durchführen bei Temperaturen unter 10°C (50°F) oder über 40°C (104°F).
- Nicht testen bei einer Feuchtigkeit von unter 10% über 90%.
- Bitte niemals einen Teststreifen biegen, schneiden oder verändern.
- Vermeiden Sie, dass Schmutz, Lebensmittel oder Flüssigkeit durch Ihre Hände auf den Teststreifen gelangen.
- Vermeiden Sie, dass Schmutz, Staub, Lebensmittel, Flüssigkeiten auf die Kontakteise (Rückseite des Teststreifens) gelangen.

Übertragung Ihrer Messergebnisse

Sie können die GluNEO® plus Messergebnisse auf einen Computer übertragen. Dazu müssen Sie die Software von folgender Web-Seite herunterladen.


<http://www.osanghc.com> und Sie müssen sich das passende Verbindungskabel von Ihrem Händler besorgen. Es wird separat verkauft.

Bitte nur das original Verbindungskabel von OSANG Healthcare verwenden.



Einlegen der Batterie

Das Symbol, leere Batterie erscheint in der oberen Ecke des Displays, um Sie zu warnen, dass sie bald leer sein wird, also bald eine neue Batterie erforderlich ist.

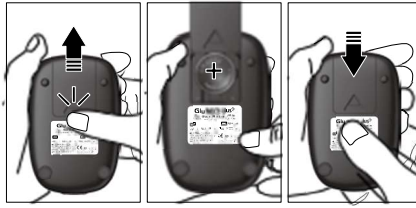

Ihr GluNEO®plus Blutzuckermessgerät benötigt nur eine 3V Lithium Batterie (CR2032), diese ist dem Set beigelegt. Batterie immer nur mit einer CR2032 Batterie ersetzen.

Nach dem Batterie-Wechsel!!

1. Überprüfen Sie das Messgerät durch einen Test mit der Kontrolllösung.
2. Führen Sie Ihren Test erneut durch.
3. Wenn bei Ihnen Symptome auftreten, die nicht mit Ihren Messergebnissen im Einklang sind, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt in Verbindung.

ACHTUNG

- Überprüfen Sie bitte nach dem Batteriewechsel, ob Datum und Uhrzeit noch korrekt sind.
- Batterien müssen getrennt entsorgt werden. Niemals in den Hausmüll!! Bitte beachten Sie Ihre örtlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Batterien.
- Das Einlegen einer falschen Batterie könnte eine Explosion des Geräts zur Folge haben.

Messgerät und Batterien entsorgen

Entsorgen des Blutzuckermessgeräts:


Das Blutzuckermessgerät muss gemäss den Vorschriften zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Die Verordnung über Elektro- und Elektronikgeräten setzt die Bestimmung der Richtlinie 2012/19/EU um, mit denen die Menge der zur endgültigen Entsorgung bestimmten Elektro- und Elektronik-Altgeräten verringert werden soll. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Entsorgen der Batterien:

Bitte entsorgen Sie Ihre gebrauchten Batterien bei Ihren örtlichen Batteriesammelsystemen, unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften. Batterien enthalten Chemikalien, deren Freisetzung die Umwelt und die Gesundheit beeinträchtigen können.

Entsorgen der Blutzuckerstreifen und Lanzetten


Hinausschieben des Blutzuckerteststreifens

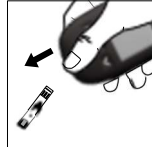

Wenn der Test abgeschlossen ist, können Sie den Teststreifen mit dem Auswurfschieber entfernen.



Verwahren Sie Ihre gebrauchten Blutzuckerteststreifen in einem verschlossenem Behälter. Die Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften

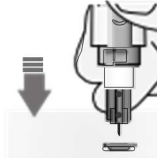





1. Stechen Sie die Nadel in die Schutzhülle.








2. Schieben Sie die Lanzette heraus und sicher entsorgen.

Fehlerbehebung


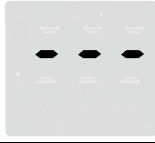
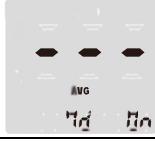
Diese Tabelle kann Ihnen helfen, bestimmte Fehlermeldungen zu verstehen und zu lösen. Es kann aber nicht helfen, sämtliche mögliche Fehler, die auftreten können, zu lösen. Sollten weiterhin Fehlermeldungen auftreten, kontaktieren Sie bitte in einem solchen Fall Ihren Händler.

Anzeige	Was es bedeutet	Aktion
	Problem mit dem Blutzuckermessgerät.	Legen Sie die Batterie erneut ein und stellen Sie das Gerät wieder ein. Sollte weiterhin dieses Zeichen angezeigt werden, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Verursacht durch einen bereits gebrauchten oder nassen Blutzuckerteststreifen.	Bitte einen neuen Teststreifen benutzen und einen erneuten Test durchführen.
	Verursacht durch zu geringem Blutstropfen oder durch einen Fehler beim Auftragen des Blutstropfen.	Bitte einen neuen Teststreifen benutzen und den Blutstropfen entsprechend der Gebrauchsanweisung auftragen.
	Verursacht durch einen Schaden des Reagenz am Teststreifen.	Bitte einen neuen Teststreifen benutzen und den Test erneut durchführen.

Fehlerbehebung

Anzeige	Was es bedeutet	Aktion
	Blutstropfen wurde aufgetragen, bevor das Symbol angezeigt wurde.	Warten Sie, bis das Gerät im Display das entsprechende Symbol angezeigt wird, bevor Sie den Blutstropfen auftragen.
	Verursacht durch Verunreinigung des Kontaktfelds oder falscher Teststreifen.	Legen Sie bitte einen neuen Teststreifen ein, um einen neuen Test durchzuführen. Erscheint auch das Symbol "Sonne", vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. Besteht das Problem weiterhin, bitte Ihren Händler kontaktieren.
	Die Temperatur ist geringer als 10° C (50°F)	Legen Sie das Messgerät für mindestens 30 Minuten in einen Temperaturbereich zwischen 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), dann einen erneuten Test durchführen.
	Die Temperatur ist höher als 40°C (104°F)	Legen Sie Ihr Messgerät für mindestens 30 Minuten in einen Temperaturbereich von 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), dann einen erneuten Test durchführen.
	Das Testergebnis ist niedriger als 20 mg/dL (1.1mmol/L)	Möglicherweise haben Sie einen sehr niedrigen Blutzuckerspiegel. Behandeln Sie diesen Zustand sofort entsprechend der Empfehlungen Ihres Arztes. Führen Sie einen Test mit der Kontrolllösung durch, um die Genauigkeit des Messgeräts und der Teststreifen zu überprüfen.

Fehlerbehebung

Anzeige	Was es bedeutet	Aktion
	Das Testergebnis ist höher als 600 mg/dl (33,3mmol/L)	Überprüfen Sie die Funktion durch einen Test mit der Kontrolllösung. Wenn das Ergebnis im angegebenen Messbereich liegt, machen Sie noch zwei, drei Tests mit Ihrem Blut. Wenn "Hi" angezeigt wird, bitte sofort einen Arzt konsultieren.
	Es wird im Display kein Ergebnis angezeigt.	Bitte einen neuen Teststreifen einschieben und den Blutstropfen komplett auftragen (siehe Gebrauchsanweisung).
	Nicht genügend Ergebnisse im Speicher, um den Durchschnitt anzuzeigen.	Bitte einen neuen Teststreifen benutzen und darauf achten, dass beim nächsten Messvorgang genügend Blut aufgetragen wird.
Das Gerät schaltet sich nicht an.	Batterie könnte leer sein oder es gibt einen Defekt am Gerät	Wechseln Sie die Batterie und wenn das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Blutuckermessgerät startet nicht nach dem Blutstropfens.	Blut reichte nicht aus	Bitte neuen Teststreifen benutzen und nochmals den Test starten.
Widersprüchliche Ergebnisse	Der Teststreifen könnte defect sein	Bitte neuen Teststreifen benutzen und den Test nochmals starten.

Unerklärliche Testergebnisse

Wenn Sie auch nach einer Wiederholung weiterhin unerwartete und nicht zu erklärende Testergebnisse erhalten, überprüfen Sie bitte das Gerät mit der Kontrollloöung. Bitte ignorieren Sie unerklärliche Messergebnisse nicht einfach. Nehmen Sie aufgrund solcher Ergebnisse nicht eigenhändig Änderungen an Ihrer Medikation vor und informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt

ACHTUNG

- Niedriger Messergebnis: Wenn Ihre Ergebnisse unter 70mg/dl liegt, kann dies eine Hypoglykämie (zu niedriger Blutdruck) bedeuten. Das kann eine sofortige Reaktion erfordern. Setzen Sie sich bitte unbedingt und sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- Hohe Messergebnis: Wenn Ihre Ergebnisse höher als 180mg/dl liegt, kann dies eine Hyperglykämie (hoher Blutdruck) bedeuten. Wenn Sie sich über Ihre Testergebnisse nicht sicher sind, sollten Sie einen erneuten Test vornehmen. Setzen Sie sich bitte auch mit Ihrem Arzt in Verbindung. Wenn das Messgerät ständig "HI" anzeigt, überprüfen Sie bitte Ihren Blutzucker erneut. Wenn weiterhin "HI" angezeigt wird, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt.

Garantie des Herstellers

Hersteller-Garantie

OSANG Healthcare Co., Ltd. garantiert, dass das Blutzuckermessgerät frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist. Diese Garantie gilt für 3 Jahre ab Kaufdatum.

Ausschluss der Garantie

Zur Wahrung der Garantie bitte beachten:

1. Die Garantie seitens OSANG Healthcare Co., Ltd. erlischt, wenn die Funktionsweise durch Missbrauch, Unfälle oder Reparatur durch eine dritte Person beeinträchtigt wurde oder die Funktionsweise durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung herbeigeführt wurde.
2. OSANG Healthcare Co., Ltd. hält sich das Recht vor, Änderungen am Design vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, diese Änderungen auch an bereits ausgelieferte Geräte vorzunehmen.
3. OSANG Healthcare Co., Ltd. kann keine Garantie für die Messergebnisse übernehmen, wenn der Teststreifen in irgendeiner Weise verändert oder modifiziert wurde.






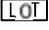











WICHTIGER HINWEIS

Bitte verständigen Sie sich mit Ihrem Vertreter vor Ort, bevor Sie ein Messgerät zurücksenden. Sie erhalten dann die Information, die Sie benötigen, um Ihr Problem richtig und effizient zu lösen. Halten Sie bitte Ihr Messgerät, einen Teststreifen und die Kontrolllösung bereit, wenn Sie anrufen.

Spezifikationen

Probenmaterial	Frisches kapillares/venöses Vollblut
Sample Volume	0.5ul
Test Range	20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L)
Reaktionszeit	5 Sekunden
Kalibrierung	Plasma -äquivalent
Hämatokrit	20 ~ 60%
Maximale Höhe	Bis zu 3048 Meter (10,000 feet)
Operating Temperature	10 ~ 40°C (50 ~ 104°F)
Operating Humidity	10-90% RH
Test Strip Storage Temperature	Aufbewahren bei 2- 30°C(36- 86°F) und nicht dem Sonnenlicht aussetzen. Bitte nicht einfrieren.
Display Type	LCD
Abmessungen(WxHxD)	86x57x18 (mm)
Gewicht	43+1g (mit Batterie)
Energiequelle	3V (Batterie), CR2032 x 1EA
Lebensdauer der Batterie	Bis ca. 1 Jahr nach der Inbetriebnahme

Bedeutung der Symbole

Symbol	Beschreibung
	Gebrauchsanweisung lesen
	Haltbarkeitsdatum
	CE-Kennzeichnung/Kennung der benannten Stelle
	Achtung
	Nur zur In-Vitro-Diagnostik
	Chargenbezeichnung
	Nur einmal verwenden
	Seriennummer
	Herstellungsdatum
	Hersteller
	Vor Sonnenlicht schützen
	Batterien nicht im Hausmüll entsorgen
	Temperaturbegrenzung
	Referenznummer
	Zum selber testen
	EU-Bevollmächtigter
	Nicht im Hausmüll entsorgen

